

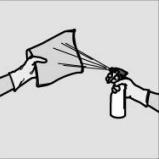
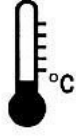


Bij lichte bevuiling **Spray het object in en laat 3-5 minuten inwerken** **Schoon wrijven met een droge schone doek** **Er hoeft niet nagespoeld te worden** *

	Incidin Foam Reinigen en desinfecteren		Bij lichte bevuiling en dagelijks gebruik Geen keuken product				
Medische instrumenten wagen		Incidin Foam		gebruik sprayer	5 min een dosering	Niet naspoeien	Waarschuwing

Bij normale bevuiling **Product op een schone doek sprayen** **Daarmee het object inwrijven** **Er hoeft niet nagespoeld te worden** *

	Alklanet spray reiniger		Bij normale bevuiling				
Medische instrumenten wagen		Alklanet		Product op schone doek sproeien	Koud		

Bij zwaardere bevuiling **Product op een zachte spons aanbrengen** **Het object licht inwrijven in draaiende bewegingen** **Er moet wel nagespoeld worden** **Niet op kunstof oppervlakker gebruiken** *

	Helios Brillant schuur middel		Bij zwaardere bevuiling				
Medische instrumenten wagen		Helios Brillant 500ml		5-10 min	Koud	Naspoeien	Waarschuwing

* = Deze instructie is op maat gemaakt of opnieuw gedefinieerd. Ecolab is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Ecolab BV 030-6082222